

# Грелки резиновые, тип А

ГОСТ 3303-94 РУ №ФСР 2011/10822 от 23.05.2011

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИЭ)

### 1. Назначение.

Резиновая грелка предназначена для местного согревания тела.

Номер грелки соответствует ее вместимости в литрах.

### 2. Эксплуатация.

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90°C, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1%-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства ("Новость", "Прогресс", "Лотос"), затем промыть проточной водой.

С целью исключения вытекания воды из грелки во время пользования, необходимо во втулку вкрутить пробку строго по резьбе до упора.

### 3. Хранение.

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25°C на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.