

# ИНСТРУКЦИЯ НА НОСИЛКИ ТАКТИЧЕСКИЕ БЕСКАРКАСНЫЕ

## Базовый способ применения носилок:

1. Разложить носилки на земле. На них положить бронезилет, раненого, сверху каремат или коврик-пятиточечник. Расстелить спасодеяло серебристой стороной к телу. **Рис. 1**

2. Расположить на подготовленных носилках раненого на 5-7 см ниже верхнего уровня сетки. Надеть шапочку, шлем (чтобы не травмировать голову при транспортировке). Завернуть в спасодеяло как можно плотнее, не оставляя щелей, через которые будет выходить тепло. **Рис. 2**

**Важно помнить:** раненый, особенно с кровопотерей, крайне подвержен переохлаждению, что существенно усугубляет общее состояние.


3. Сформировать вокруг раненого кокон из носилок, продевая ручки через ячейки сетки таким образом, чтобы раненый был надежно и плотно зафиксирован. Ручки скрепить карабинами либо просто связать между собой. **Рис. 3**

**ВАЖНО:** носилки конструктивно рассчитаны на перенос за ячейки стропы, что позволяет ухватиться в любом удобном месте.

В случае **ранения в грудь** — подразумеваем наличие пневмоторакса у раненого. В этом случае раненого предпочтительно транспортировать в полусидячем положении — так ему легче дышать. Для этого следует продеть эвакуационную стропу через ячейки носилок и сформировать 2 петли с точками крепления в районе таза и плеч. **Рис. 4**

Настроить длину петель, завязав излишек стропы узлом «восьмерка» и спрятав излишек под ячейки носилок. Петли надеть через плечо, руками немного приподнимать головной конец носилок, добиваясь максимально комфортного положения раненого. **Рис. 5**

Если у бойца **травма ног** — особое внимание уделить формированию жесткого основания в районе ног и надёжно шинировать (1 сустав выше травмы и все суставы ниже). В таком случае необходимо эвакуировать втроем. **Рис. 6**

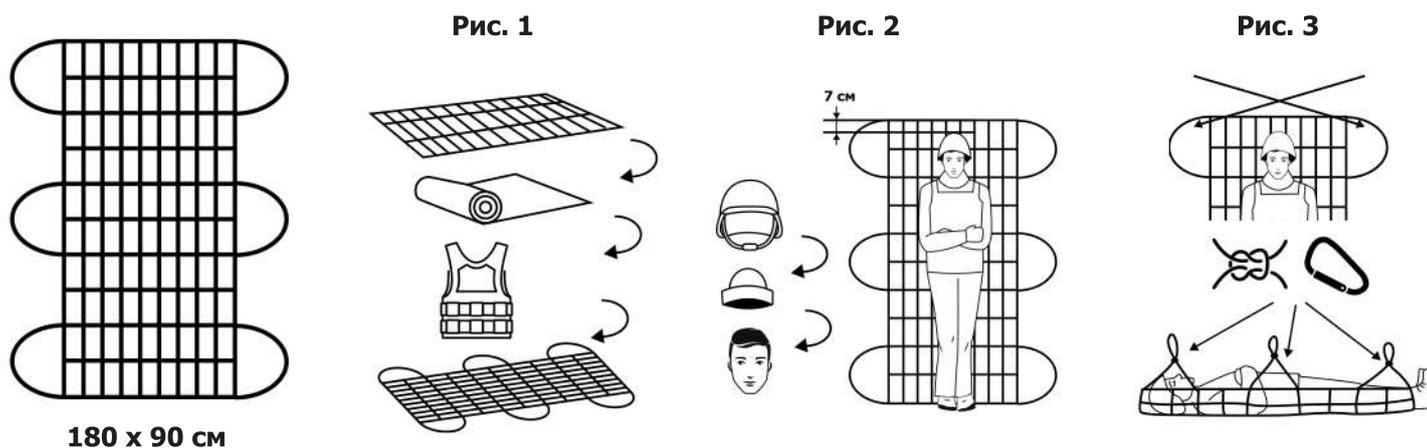

## Применение носилок с эвакуационной стропой

1. Стропу сложить пополам и продеть под узлами или карабинами носилок в области головы и таза, концы стропы закрепить на петле.

2. Чтобы укоротить ляжки из стропы для удобного захвата, петлю завязать узлом и закрепить концы стропы до узла.

## Шинирование

При травме ноги сформировать жесткое основание и надёжно шинировать минимум 1 сустав выше травмы и все суставы ниже. Обязательно подложить Г-образную подкладку снизу под ногу (желательно мягкую), зафиксировать с обхватом стопы и шинами по бокам.

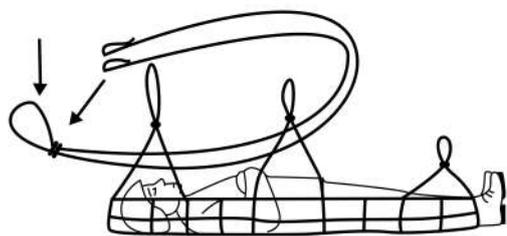


Рис. 4

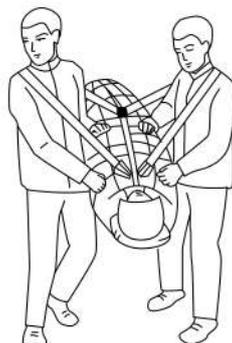


Рис. 5

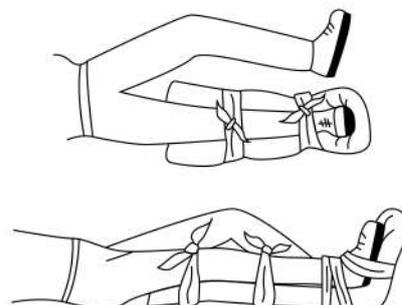


Рис. 6