



Способ применения:

Извлечь пластину из упаковки. При необходимости отрезать пластину нужного размера с таким расчетом, чтобы она покрывала область рубца с заступом, как минимум, 1 см на окружающую кожу. Удалить защитную пленку и наложить WinnerPlast™ на чистый и сухой рубец. WinnerPlast™ следует носить постоянно. Платину можно снимать, если необходимо обработать рубец, а затем накладывать повторно.

WinnerPlast™ при обычных условиях рекомендуется менять каждые 3-7 дней или при утере пластиной адгезивных свойств.

Внимание! В случае возникновения мацерации или сыпи удалить пластину и подождать исчезновения симптомов, затем продолжить использование, постепенно увеличивая время использования пластины. Если симптомы сохраняются, прекратить использование и обратиться к врачу.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +10° С до +35° С, влажности: 30-70%, вдали от отопительных приборов.

